



## Kit d'étalonnage

### Consommables Exsudose® pour calibration de l'électrode (sonde)

#### ■ Utilisation

La méthode EXSUDOSE® préconise un étalonnage en trois points. Pour ce faire trois solutions étalons sont mises à votre disposition :

- Flacon A - 20 meq de Chlorures [couleur bleue]
- Flacon B - 60 meq de Chlorures [couleur jaune]
- Flacon C - 100 meq de Chlorures [couleur rouge]

L'étalonnage doit s'effectuer impérativement en allant de A vers C. La couleur attribuée permet de respecter cet ordre sur le présentoir prévu à cet effet. Ces 3 flacons représentent un «kit étalonnage».

#### ■ Conservation/stockage :

Les flacons neufs ou déjà entamés (bien rebouchés) doivent être conservés à température ambiante, à l'abri de la lumière. Ils sont utilisables jusqu'à la date de péremption apposée sur les flacons.

#### ■ Fiche de données de sécurité :

Les fiches de données sécurité des produits sont à votre disposition sur simple demande.

