



Kit sudation

Consommable Exsudose® pour stimulation et recueil de la sueur

■ Utilisation :

Le kit de sudation contient 20 tampons, 20 EXSUPATCH® et 1 pince manipulation.

Les tampons comportent 2 parties distinctes : la solution de pilocarpine pour stimuler et la solution d'électrolyte pour le contact. L'EXSUPATCH® est ensuite appliqué pour recueillir la sueur. Le tout est manipulé par la pince pour éviter tout contact entre le praticien et le patient.

■ Composition du kit :

- L'EXSUPATCH®

Innovation de l'EXSUOSE®, l'EXSUPATCH® est un dispositif à usage unique qui a la forme d'une petite coupole inversée. Positionnée à l'emplacement du tampon de pilocarpine préalablement nettoyé après la stimulation, elle en protège la zone tout en favorisant l'apparition de la sueur native. Après 15 minutes de sudation, l'électrode est posée directement au contact de la peau par l'orifice de la capsule débarrassée de son opercule. Ce dispositif ne nécessite aucune manipulation de la sueur, ce qui diminue les risques de modification de l'état de celle-ci. Le patient est libre également de ses mouvements.

- LES TAMPONS

Fabriqués en coton spécial pré-imbibé à usage unique, les tampons se placent dans les logements adéquats du MICROSTIM® afin de réaliser l'excitation des glandes sudoripares. Le grand tampon contient du nitrate de pilocarpine à 1% pour l'anode. Le petit tampon contient de l'électrolyte, du sulfate de potassium K₂SO₄ à 1% pour la cathode. Ils sont protégés dans un double blister qui porte leur date de péremption.

- LA PINCE MANIPULATION

